



PURALID[®]
LIPOGE
L

PURALID
PURALID
PURALID
PURALID
PURALID
PURALID

Használati útmutató

Puralid[®] lipogel szemhéjszéli gyulladásban vagy szemhéjszéli- és kötőhártya-gyulladásban való használatra

Mi a Puralid[®] lipogel?

A Puralid[®] lipogel a szemhéjak és a szemkörnyékképzőszövetek nyugtatására és tisztítására szolgáló természetes készítmény. Liposzómákat, teafaolajat, A-vitamint, xantángumit, ferulinsavat, E-vitamin TPGS-t, valamint alfa-bizabololt tartalmaz.

A liposzómák, amelyek kettős foszfolipid rétegből állnak, nyugtató és puhító tulajdonságaikról, valamint azon képességükről ismertek, hogy hatékonyan célba juttatják az aktív összetevőket.

A teafaolaj, amelyet az ausztrál teafából (Melaleuca alternifolia) nyernek, antimikrobiális tulajdonságairól ismert.

Az A-vitamin az epiteliális funkció szabályozásával erősíti és támogatja a bőrt. Emellett egy olyan antioxidáns, amely a xantángumival, a ferulinsavval és az E-vitamin TPGS-sel, valamint a liposzómák kalszinerjikusan hatva védik a szemhéj felszínét a szabadgyökök és az UV-sugarak oxidatív hatásától.

Az alfa-bizabolol a kamilla illóolaj fő összetevője. Nyugtató tulajdonsággal rendelkezik, csökkenti a vörösséget és a gyulladást még különösen érzékeny bőr esetében is. Jó bőrtolerancia jellemzi.

Mire használatos a Puralid[®] lipogel?

A Puralid[®] lipogel felpuhítja és eltávolítja a szemhéjról a szemhéjszéli gyulladás vagy a kötőhártya-gyulladás során a szemhéjon keletkező hámló maradványok felpuhítására és eltávolítására szolgál.

Milyen gyakran használandó a Puralid[®] lipogel?

A terméket használja naponta kétszer vagy többször, ha orvosa úgy tanácsolja.

A Puralid[®] lipogel használatának módja

Az első használat előtt a flakont függőlegesen tartva 3–5-ször nyomja le a pumpát, ezzel feltöltve az adagolórendszert, amíg az el nem kezdi adagolni a gélt.


1. Alaposan mosson kezet.




2. Tegyen egy kis adag Puralid[®] lipogel az ujjhegyére.



3. Gyengéd, körkörös mozdulatokkal oszlassa el a szemhéjain.

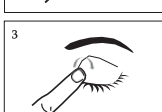

4. Hagyja hatni pár percig. A hámló maradványokat törölje le tiszta törülközővel vagy vattakoronggal.

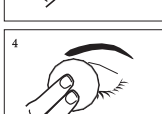

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót. Tartsa meg ezt a tájékoztatót, előfordulhat, hogy később még szüksége lesz rá.

Bármilyen további kérdés esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

Melyek a lehetséges mellékhatások?

AMÉNNYIBEN BÁRMELY MELLÉKHATÁSTAPASZTAL, TÁJÉKOZTASSA ORVOSÁT VAGY GYÓGYSZERÉSZÉT.

A Puralid[®] lipogel tárolása

- Tárolás 25 °C alatt.
- Ne fagyassza.
- Hőtől, nedvességtől, közvetlen napfénytől védve tartandó.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

Összetétel:

Foszfolipidek S80 (a NIOLIPTÓL), bizabolol, teafaolaj, A-vitamin-palmitát, E-vitamin TPGS, ferulinsav, xantángumi, EDTA dinátrium dihidrát, kálium- szorbát, nátrium-benzoát, nátrium-hidroxi-metil-glicinát, citromsav-monohidrát, kálium-citrát három bázisú monohidrát, desztillált víz.

Figyelmeztetések

- Kizárólag külső használatra.
- A termék bármely összetevőjével szembeni túlérzékenysége esetén ne használja a terméket.
- Ne használja a terméket a csomagoláson feltüntetett lejárati időn túl.
- Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült.
- A terméket az első alkalmazás utáni 8 héten belül használja fel (15 ml-es flakon).
- A terméket az első alkalmazás utáni 24 órán belül használja fel (1 ml-es minitartály).

Kiszerelés:

Kereskedelmi: 15 ml-es flakon

Minta: 5 db 1 ml-es minitartályból álló csík

További információért forduljon orvosához vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Santen kirendeltséggel a www.santen.eu weboldalon.



OFFHEALTH SpA, Via G. Paisiello
10,50144 Firenze, Olaszország

Ez az útmutató 2020 decemberében került jóváhagyásra

Ez az útmutató 2020 decemberében került jóváhagyásra.

Gyártó	Gyártási dátum	Gyártási tétele szám	Lejárati idő	Tájékoztató használati útmutatóból.	Ne használja, ha a csomagolás sérült.	Nedvességtől óvando.	Tárolás 25 °C alatt.	Napfénytől óvando.

